



ANNEXE AU MANUEL DE PRELEVEMENT EXAMENS DE BIOLOGIE DELOCALISEE

- Dosage de la Troponine I Ultrasensible
 - CH AUBUSSON
 - CH BOURGANEUF
- Gaz du sang artériel
 - CH AUBUSSON
 - CH BOURGANEUF
- Biochimie urgente veineuse
 - CH AUBUSSON
 - CH BOURGANEUF
- CRP Capillaire
 - CH GUERET



Examen	
Nom d'examen	TROPONINE I ULTRA SENSIBLE – BIOLOGIE DELOCALISEE
Echantillon	Sang total EDTA
Synonymes	TROPONINE I HS TRIAGE
Spécialité	BIOLOGIE DELOCALISEE
Lieu d'exécution	SITES DELOCALISES (CH DE BOURGANEUF ET CH D'AUBUSSON)
Principales indications	Suspicion de Syndrome Coronarien Aigu
Critères d'interprétation	Suspicion de syndrome coronarien aigu 1^{er} dosage sur l'automate de biologie délocalisée < 3ng/L Faible probabilité d'infarctus du myocarde* Entre 3 et 60 ng/L Réaliser un 2^{ème} dosage à 1h sur l'automate de biologie délocalisée Dosage à T0 < 5ng/L ET Delta T1-T0 < 3ng/L Faible probabilité d'infarctus du myocarde* Dosage à T0 entre 5 et 60ng/L ET Delta T1-T0 < 8ng/L Patient à surveiller* ≥ 60ng/L Forte probabilité d'infarctus du myocarde* Delta T1-T0 ≥ 8ng/L (Peu importe le dosage à T0) Forte probabilité d'infarctus du myocarde* <i>*Selon Boeffinghaus et al. 2020</i>
Cotation	B63
Transport	
Transport	Passage sur l'automate dans les 4 heures après le prélèvement.



Pré-analytique	
Préparation du patient	Aucune
Type de prélèvement	Sang total artériel ou veineux
Echantillon	Sang total EDTA
Echantillon/récipient	 x 1 EDTA K3 ou EDTA K2
Quantité minimale	1 mL
Instructions spéciales	Cf Instruction TRIAGE
Analytique	
Délai de conservation de l'examen	< 4h après le prélèvement
Interférences connues	Cf instruction TRIAGE
Post-analytique	
Délai de réponse ou fréquence	Immédiat
Examen pouvant être réalisé en urgence	OUI
Documents	
	Instruction TRIAGE



Examen	
Nom d'examen	GAZ DU SANG ARTERIEL – BIOLOGIE DELOCALISEE
Echantillon	Sang total hépariné
Synonymes	GAZOMETRIE ARTERIELLE DELOCALISEE
Spécialité	BIOLOGIE DELOCALISEE
Laboratoire exécutant	SITES DELOCALISES (CH DE BOURGANEUF ET CH D'AUBUSSON)
Principales indications	Patient nécessitant une prise en charge rapide Patient pour lesquels un résultat rapide est souhaité alors qu'aucune navette n'est prévue rapidement et qu'aucun autre paramètre ne justifie d'en demander une
Critères d'interprétation	Valeurs usuelles disponibles sur le ticket automate
Cotation	B180 avec créatinine (Aubusson) B168 sans créatinine (Bourganeuf)
Transport	
Transport	Passage sur l'automate le plus rapidement possible dans les 30 min après le prélèvement



Pré-analytique	
Préparation du patient	Aucune
Type de prélèvement	Sang total artériel
Echantillon	Sang total artériel sur seringue héparinée
Echantillon/récipient	 x 1 seringue sang artériel hépariné
Quantité minimale	1 mL
Instructions spéciales	Cf Instruction Abl90flex plus
Analytique	
Délai de conservation de l'examen	< 30 minutes après le prélèvement
Interférences connues	Cf instruction Abl90 flex plus
Post-analytique	
Délai de réponse ou fréquence	Immédiat
Examen pouvant être réalisé en urgence	OUI
Documents	
	Instruction Abl90 flex plus



Examen	
Nom d'examen	BIOCHIMIE URGENTE- BIOLOGIE DELOCALISEE
Echantillon	Sang total hépariné
Synonymes	BILAN VEINEUX DELOCALISE
Spécialité	BIOLOGIE DELOCALISEE
Laboratoire exécutant	SITES DELOCALISES (CH DE BOURGANEUF ET CH D'AUBUSSON)
Principales indications	Patient nécessitant une prise en charge rapide Patient pour lesquels un résultat rapide est souhaité alors qu'aucune navette n'est prévue rapidement et qu'aucun autre paramètre ne justifie d'en demander une.
Critères d'interprétation	Valeurs usuelles disponibles sur le ticket automate
Cotation	B180 avec créatinine (Aubusson) B168 sans créatinine (Bourganeuf)
Transport	
Transport	Passage sur l'automate le plus rapidement possible dans les 30 min après le prélèvement



Pré-analytique	
Préparation du patient	Aucune
Type de prélèvement	Sang total veineux
Echantillon	Sang total veineux sur seringue héparinée
Echantillon/récipient	 x 1 seringue sang veineux hépariné
Quantité minimale	1 mL
Instructions spéciales	Cf Instruction Abl90 flex plus
Analytique	
Délai de conservation de l'examen	< 30 minutes après le prélèvement
Interférences connues	Cf instruction Abl90 flex plus
Post-analytique	
Délai de réponse ou fréquence	Immédiat
Examen pouvant être réalisé en urgence	OUI
Documents	
	Instruction Abl90 flex plus



Examen	
Nom d'examen	CRP CAPILLAIRE – BIOLOGIE DELOCALISEE
Echantillon	Sang total capillaire
Synonymes	CRP PEDIATRIQUE PROTEINE C REACTIVE
Spécialité	BIOLOGIE DELOCALISEE
Laboratoire exécutant	SITE DELOCALISE (PEDIATRIE – CH DE GUERET)
Critères d'interprétation	Valeur usuelle disponible sur le ticket automate
Principales indications	Patient nécessitant une prise en charge rapide Analyse prescrite seule
Cotation	B9
Transport	
Transport	Passage sur l'automate le plus rapidement possible dans les 2 min après le prélèvement



Pré-analytique	
Préparation du patient	Aucune
Type de prélèvement	Sang total
Echantillon	Sang total sur capillaire EDTA
Echantillon/récipient	x 1 capillaire EDTA
Quantité minimale	10 µL
Instructions spéciales	Cf Instruction QUICKREAD GO
Analytique	
Délai de conservation de l'examen	< 2 minutes
Interférences connues	Cf instruction QUICKREAD GO
Post-analytique	
Délai de réponse ou fréquence	Immédiat
Examen pouvant être réalisé en urgence	OUI
Documents	
	Instruction QUICKREAD GO